

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日:令和 3 年 10 月 27 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 0ED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 0ED-1000S ☐				製造番号:	100291
作業年月日	令和 3 年 10 月 27 日				作業時間:	1.5 Hr
顧客名	札幌センチュリー病院				TEL:	011-871-1121
所在地	札幌市白石区菊水元町5条3丁目5-10				ご担当	様
販売店	ロクメディカル(株)				ご担当	様
納入年月日	2012 年 1 月 23 日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	定期点検シール記入 ☐		
作業区分	保守点検	☒	総合点検	☐	年 回目	☐
	修理	☐	点検のみ	☐	その他	☐
出張・引取					修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

殺菌時給水異常(E:202) x2
殺菌槽異常(E:101) x1

不具合原因、作業内容

下記の定期交換部品の交換作業

点検項目	殺菌槽	LED	正常	☒
フタロック	正常	☒	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	正常	☒
オゾンセンサ	正常	☒	正常	☒
給水ライン	正常	☒	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	正常	☒
水位センサー	正常	☒	正常	☒
水漏れ確認	正常	☒	正常	☒
清掃	正常	☒	正常	☒
トレー	正常	☒	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	正常	☒

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

経年による汚水、サビが目立ちます、清掃も承っております(別料金)
Ver.0103/To3D 運転総計(19597回)

装置情報	交換後運転回数:	898	更新(リセット)実施:	未実施	殺菌/消毒:	9183	殺菌/消毒+7L:	7722
	リークチェック:	2	自己洗浄:	2250	7Lコイル単独:	406	エア単独:	34

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒 LOT	11082482	☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

R3 年 10 月 27 日

ご署名 長谷川 志乃 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 TEL: 011-741-7752	責任技術者	作業者
			吉田