

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和3年 11 月 2 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐	製造番号： 100034
作業年月日	令和 3 年 11 月 2 日	作業時間： / Hr
顧客名	内科胃腸科クリニック長尾医院 様	TEL： 011-861-4696
所在地	札幌市白石区本通11南1-9	ご担当 様
販売店	ロックメディカル(株)	ご担当 山田 様
納入年月日	2010年 6月 18日 保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検、部品交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 7/6
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

問題ございません。タッチパネルの寿命が近いかもしれません。(線が入ってる)

装置情報	交換後運転回数： 76 更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 296	殺菌/消毒+7L： 703
	リークチェック： 12 自己洗浄： 2	7L単独： 0	エア単独： 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 11 月 2 日

ご署名

長尾 真幸

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者 作業者

本間