

保守点検・修理 報告書

管理 No. 発行日:令和 3 年 11 月 18 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 □ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S □				製造番号: 300676
作業年月日	令和 3 年 11 月 18 日				作業時間: 1.5 Hr
顧客名	北仁会 旭山病院				TEL: 011-641-7755
所在地	札幌市中央区双子山4丁目3番33号				
販売店	(株)スズケン 医療機器課				ご担当 佐々木 様
納入年月日	2015 年 10 月 23 日	保証期間	内 □ 外 □	ご担当 東 様	
作業区分	保守点検 □	総合点検 □	年 回目	定期点検シール記入 □	修理表示貼付 □
出張・引取	修理 □	点検のみ □	その他 □		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

特に何

不具合原因、作業内容

特にございせん、下記の定期交換部品の交換作業

点検項目		殺菌槽 LED	正常	正常
フタロック	正常	正常	正常	正常
酸素ライン	正常	正常	正常	正常
アルコールライン	正常	オゾン水濃度計動作	正常	ハム数 465
オゾンセンサ	正常	排水栓、排水ライン	正常	正常
給水ライン	正常	細管送水ライン	正常	正常
濃度計流量	正常	排気ライン	正常	正常
水位センサー	正常	オゾン濃度	正常	履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	異常音、振動	正常	正常
清掃	正常	電源コード	正常	正常
トレー	正常	殺菌チューブ類	正常	正常
殺菌槽コネクタ	正常	マニホールド周辺チューブ	正常	正常
	□		□	

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

特に問題ございせん、水槽内も非常にきれいです

Ver 0207/TO2C 運転合計 680 回

装置情報	交換後運転回数:	0	更新 (リセット) 実施 / 未実施	殺菌/消毒:	11	殺菌/消毒+7L:	237
	リークチェック:	195	自己洗浄:	29	7Lコールド:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒	18073193	✓	1	吸盤		✓	3
排水栓		✓	1	接続コネクタ: 水槽側		□	
ポン水濃度計		✓	1	接続コネクタ: チューブ側		□	
ポン水濃度計用フィルタ		✓	1			□	
オゾンセンサー		✓	1			□	

お客様ご確認署名欄

2021 年 11 月 18 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 佐々木 貴志 印

修理業者	新鋭工業 株式会社 札幌支店 北海道札幌市東区北七条東4-28-3 TEL: 011-741-7752	責任技術者	作業者
			吉田