

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：令和3年 12 月 8 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号： 301025
作業年月日	令和 3 年 12 月 8 日	作業時間： 1 Hr
顧客名	泌尿器科宮尾クリニック 様	TEL： 0143-42-3800
所在地	室蘭市中島町2丁目26-12	ご担当 様
販売店	(株)スズケン	ご担当 様
納入年月日	2016 年 10 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
保守点検 異常履歴 なし	
不具合原因、作業内容	
定期点検 部品交換	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ バルブ数 391
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.2 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒ 交換
☐	☐
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
問題ございませんでした。	

装置 情報	交換後運転回数： 1053	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒： 1094	殺菌/消毒+アル： 1179
	リークチェック： ☐	自己洗浄： ☐	アルコール単独： 23	エア単独： 2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	マニホールドポート		☒	3
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	3 年 12 月 8 日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 原田	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 札幌支店
北海道札幌市東区北七条東4-28-3
TEL：011-741-7752

責任技術者	作業者
	本間