

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成21年 12月 2日	機種名	ONW-10	製造機番	001230
設置場所	1F 内視鏡室			TEL	0846-63-0311
設置時期	平成18年12月18日	使用時間	823回	御対応者	

点検項目		点検結果			
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 :	0.5	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒			0.099
酸素発生	正常	☒	濃度 :	95.0	% 流量 : 0.75 L/min 圧力 : ~0.182 MPa
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☒	
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	0リング 交換 ☒
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	異常ありませんでした。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
0リング	一個	

09.12.02
年 月 日

ご署名

田村 裕



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。