

佐藤内科胃腸科 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤 裕

点検年月日	平成21年 4月 3日	機種名	ONW-10	製造機番	000152
設置場所	2F 内訳錠室			TEL	: 084-922-6561
設置時期	平成17年 7月 15日	使用時間		御対応者	

IS

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☒ 調整
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☐ 未実施	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☐	濃度:	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.0 %	流量: 0.015 L/min 圧力: 0.112 ~ 0.202 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	エー-4 (レフィルサ異常) 対応 拒抗 Assy を交換して 復旧しました
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
排水シソコニマニ	一本	
拒抗 Assy	一個	

H 21 年 4 月 3 日

ご署名

中澤 裕

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。