

# 点検確認書

株式会社 IHI シバウラ  
環境事業部

点検担当者: 中澤 裕

|       |                |      |             |      |                |
|-------|----------------|------|-------------|------|----------------|
| 点検年月日 | 平成 22年 7月 28日  | 機種名  | ONW-10      | 製造機番 | 000152         |
| 設置場所  | 2 F 内視鏡室       |      |             | TEL  | : 084-922-6561 |
| 設置時期  | 平成 15 年 7月 15日 | 運転回数 | CNT99 #9388 | 御対応者 |                |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |                                               |                                     |
|------------|------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |                                               |                                     |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                            | <input type="checkbox"/>            |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                            | <input type="checkbox"/>            |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                            | <input type="checkbox"/>            |
| ランプ類       |      |                                     |                                               |                                     |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 洗浄動作       |      |                                     |                                               |                                     |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 性能確認       |      |                                     |                                               |                                     |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 0.4 mg/L                                  |                                     |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |                                               |                                     |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度: 94.7 % 流量: 0.77 L/min 圧力: 0.101~0.189 MPa |                                     |
| 水漏れ確認      |      |                                     |                                               |                                     |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 清掃         |      |                                     |                                               |                                     |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                            | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |

| 交換部品     | 数量 | コメント        |
|----------|----|-------------|
| 吸着筒      | 一式 | 異常ありませんでした。 |
| 吸湿筒      | 一式 |             |
| ドレン用フィルタ | 一個 |             |
| オゾン分解触媒  | 一個 |             |

ご署名

佐藤 裕

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。