

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤-裕

21

点検年月日	平成20年 2 月 20 日	機種名	ONW-10	製造機番	149
設置場所	1F 内視鏡室			TEL	
設置時期		使用時間	1259	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.4	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度： 93.2 %	流量： 0.76 L/min 圧力： 0.116 ~ 0.203 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒ 左右シャワーシステムホス交換
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	一式	総合点検 2 回目 内部清掃実施しました。 異常ありません。
吸湿筒	一式	
ドレン用フィルタ	一個	
オゾン分解触媒	一個	
ホス(左右4本)	一式	
フィルタ・キャップパッキン	一個	

20 年 2 月 20 日

ご署名

