

点検確認書

定期点検および給水量不足対応

株式会社 IHIシパウラ

環境事業部

点検担当者: 新鋭工業 増原 IHI 中澤

点検年月日	平成 22年 12月 2 日	機種名	ONW-10	製造機番	:001146
設置場所	1F 内視鏡室			TEL	: 0829-50-6166
設置時期	平成 18年 8月 23日	運転回数	2776回	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☒ 様子見
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 94.2 %	流量: 0.78 L/min 圧力: 0.109~0.193MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☒ 排気ホース
洗浄コネクタ オゾンバス純正品	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	1	異常ありませんでした。
吸湿筒	交換 ☒	1	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	1	
オゾン分解触媒	交換 ☒	1	
	交換 ☐		
	交換 ☐		

ご署名

向井 俊一

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。