

神辺内科医院 御中

# 点検確認書

株式会社 IHI シバウラ  
環境事業部

点検担当者: 中澤 裕

|       |                |      |        |      |                |
|-------|----------------|------|--------|------|----------------|
| 点検年月日 | 平成 22年 11月 11日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番 | :000778        |
| 設置場所  | 1F 内視鏡室        |      |        | TEL  | : 084-925-2567 |
| 設置時期  | 平成 17年 4月 14日  | 運転回数 | 2230   | 御対応者 |                |

フィルターランプ点検まで67回

| 点検項目            | 点検結果  |                                     |                                               |                                     |
|-----------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| スイッチ類           |       |                                     |                                               |                                     |
| 電源釦             | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                            | <input type="checkbox"/>            |
| フィルタリセット釦       | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 運転/停止釦          | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                            | <input type="checkbox"/>            |
| アルコールモード釦       | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                            | <input type="checkbox"/>            |
| ランプ類            |       |                                     |                                               |                                     |
| 操作パネル           | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 蛍光灯             | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 洗浄動作            |       |                                     |                                               |                                     |
| フタロック           | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 給水              | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 順方向        | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 逆方向        | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 細管洗浄 エアパージ      | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| アルコールフラッシュ      | 正常    | <input type="checkbox"/>            | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| オゾン分解ファン        | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 排水              | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 異常音、振動          | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 性能確認            |       |                                     |                                               |                                     |
| オゾン水濃度          | 正常    | <input type="checkbox"/>            | 濃度: 0.3 mg/L                                  |                                     |
| オゾンインジケータ       | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | → (規定90%以上)                                   |                                     |
| 酸素発生            | (X)正常 | <input type="checkbox"/>            | 濃度: 88.1 % 流量: 0.76 L/min 圧力: 0.142~0.243 MPa |                                     |
| 水漏れ確認           |       |                                     |                                               |                                     |
| 装置外             | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 装置内             | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 清掃              |       |                                     |                                               |                                     |
| 外装              | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 内部              | 正常    | <input checked="" type="checkbox"/> | 排気ホース 清掃                                      | <input checked="" type="checkbox"/> |
| 洗浄コネクタ } FTS 純正 | 正常    | <input type="checkbox"/>            | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |
| 洗浄チューブ }        | 正常    | <input type="checkbox"/>            | 調整                                            | <input type="checkbox"/>            |

| 交換部品     | 数量                          | コメント                                                                          |
|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 吸着筒      | 交換 <input type="checkbox"/> | 酸素濃度が規定より低下しています。<br>部品交換をご検討下さい。<br><br>別途見積いたします。<br>(定期交換部品: 排水ホース、セパレーター) |
| 吸湿筒      | 交換 <input type="checkbox"/> |                                                                               |
| ドレン用フィルタ | 交換 <input type="checkbox"/> |                                                                               |
| オゾン分解触媒  | 交換 <input type="checkbox"/> |                                                                               |
|          | 交換 <input type="checkbox"/> |                                                                               |
|          | 交換 <input type="checkbox"/> |                                                                               |

福山市野上町2丁目10-29

医療法人社団 まこと会

ご署名 神辺内科医院

神 辺 具 治



印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。