

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成 23年 3月 10日	機種名	ONW-10	製造機番	000818
設置場所	1F 眼科内科診療室 矢			TEL : 084-924-2233	
設置時期	平成 17年 8月 12日	運転回数	2347	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.4 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度： 94.1 % 流量： 0.74 L/min 圧力： 0.118~0.206 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☒
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☒ パッキン追加 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒 } SPS-10501	1	異常ありませんでした。 次回水ポンプの交換で ご検討下さい。
吸湿筒 }	1	
ドレン用フィルタ	1	
オゾン分解触媒	1	
シリコンパッキン	1	
	交換 ☐	

〒750-0001 広島市佐伯区吉町4番1号
株式会社 健照会 セオ病院
TEL (084) 924-2233

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

栖崎 裕