

点検確認書

株式会社 IHI シバウラ
環境事業部

点検担当者: 中澤-裕

点検年月日	平成 22年 12月 28日	機種名	ONW-10	製造機番	:000149
設置場所	1F 内視鏡室			TEL	: 0893-44-2407
設置時期	平成 15年 6月 13日	運転回数	CN794: 9283	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
給水	正常	☒	調整	☒ ストレージ清掃 交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☒ 排水ホース清掃 交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度: 94.9 %	流量: 0.78 L/min 圧力: 0.038~0.172MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☒
洗浄コネクタ FTS 純正品	正常	☐	調整	☐ 交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐ 交換 ☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	異常ありませんでした。 次回点検シール貼付します。
吸湿筒	交換 ☐	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	
排水シリコンチューブ	交換 ☐	
オゾン分解触媒	交換 ☒	
排水ポンプ P-3	交換 ☒	

ご署名 中澤 裕

印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。