

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：

点検年月日	平成 23年 11 月 22 日	機種名	ONW-10	製造機番	000778
設置場所	1F 内視鏡室 (第2診察室)			TEL: 084-925-2567	
設置時期	平成 17年 4月 14日	運転回数		御対応者	

点検項目	点検結果				
スイッチ類					
電源釦	正常	☒	交換	☐	
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐	
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐	
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐	
ランプ類					
操作パネル	正常	☒	交換	☐	
蛍光灯	正常	☒	交換	☐	
洗浄動作					
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
給水	正常	☒	流量	調整 ☒	交換 ☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☒	交換 ☐
性能確認					
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.4	mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒			
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.6	%	流量: 0.78 L/min
			圧力: 0.118~0.208	MPa	
水漏れ確認					
装置外	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換 ☐
清掃					
外装	正常	☒	清掃	☐	
内部	正常	☒	清掃	☒	
洗浄コネクタ FTS純正品	正常	☐	調整	☐	交換 ☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐	交換 ☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐		異常ありませんでした。 もし大きな音が発生した場合 水ポンプの劣化の可能性があるので 交換をご検討下さい。
吸湿筒	交換 ☐		
ドレン用フィルタ	交換 ☒	1	
オゾン分解触媒	交換 ☒	1	
	交換 ☐		

ご署名 西岡 智司

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。