

点検確認書

株式会社 IHIシパウラ
環境事業部E3-6 (PSA異常)対応
酸素発生装置

点検担当者: 中澤 裕

点検年月日	平成 24年 7月 19日	機種名	ONW-10	製造機番	000149
設置場所	1F 内視鏡室			TEL	: 0893-44-2407
設置時期	平成 15年 6月13日	運転回数	CN799: 8993	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類	トビ毫髪あり			
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度: 0.5 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		0.102
酸素発生	正常	☒	濃度: 92.9 % 流量: 0.77 L/min 圧力: ~0.183 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ FTS 純正品	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品			数量	コメント
吸着筒	交換	☒	1	4 1 総合点検 8 年目 2 回目実施 E3-6 の原因で、これを 交換して復旧しました。
吸湿筒	交換	☒	1	
ドレン用フィルタ	交換	☒	1	
オゾン分解触媒	交換	☒	1	
E3コンプレッサー	交換	☒	1	
圧力スイッチ	交換	☒	1	

ご署名 あ い 明 印

※: 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

点検日、場所

平成24年7月19日

愛媛県:古川医院様

写真1:機械前面側 交換部品・・吸湿筒、ドレンフィルター



写真2:機械背面側 交換部品・・圧力スイッチ、吸着筒、エアコンプレッサー、オゾン分解食祭

