

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤 裕 (印)

点検年月日	平成24年8月20日	機種名	ONW-10	製造機番	000836
設置場所	1F 内視鏡室			TEL	084-947-1177
設置時期	平成 17年 8月 31日	運転回数	3201	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	交換	☐
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：0.4	mg/L		
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度：92.3	%	流量：0.77	L/min
					圧力：0.133~0.226	MPa
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
ドレン用フィルタ	交換 ☒	1	異常ありませんでした。 次回オゾンセンサー、水ポンプの 交換をご検討下さい。
オゾン分解触媒	交換 ☒	1	
	交換 ☐		
	交換 ☐		
	交換 ☐		

平成24年 8 月 20 日

ご署名 中澤 裕 (印)

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。