

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

06-06361

No. 120820

配布先	納入先	新鋭工業（株） 広島支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	広島県庄原市東城町川東 1-4-63-1		機番	000547
環営	ユーザー名	東城病院 様		納入日	平成17年6月22日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成24年6月27日
	返送先	納入先と同じ		発送日	平成24年8月18日
計	3				

修理依頼・苦情内容

インジケータ変色不良、異音、水漏れ※

※6/25 新鋭工業殿が定期点検作業を実施中に機械左側前方より少量の水漏れを発見した。

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

・水漏れにつきまして

3日間水槽に水を張り、水槽本体に問題が無いことを確認しました。

アップカバーと水槽の隙間にあるシール剤が性能劣化していましたので

これが水漏れの原因と推測し、カバーを組み直してシール剤を充填しました。

写真：弊社工場で組付けた部品



[2] 修理・点検内容

1. 水漏れ修理、部品取り付け

2. オゾン水濃度測定：0.41～0.52mg/L・・・正常

3. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：93.2% 酸素流量：0.78L/min 圧力：0.100～0.180MPa（AC100V, 60Hz）

4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

5. 運転カウンタ：2335

—以上—

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	吸着筒、吸湿筒	1式	新鋭工業殿組付け
	ドレンフィルター	1個	新鋭工業殿組付け
	オゾン分解触媒	1個	新鋭工業殿組付け
	排水バルブ用チューブ	1本	
	水ポンプ（P-1；オゾン水製造用）	1個	異音の原因

承認



審査



作成

H24. 8. 20

中澤