

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ

環境事業部

点検担当者：中澤-裕

点検年月日	平成 24年 12月 20日	機種名	ONW-10	製造機番	001230
設置場所	1F 内視鏡室			TEL	: 0846-63-0311
設置時期	平成 18年 12月18日	運転回数	2208	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度 : 0.5	mg/L
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度 : 92.4 %	流量 : 0.73 L/min 圧力 : 0.121 ~ 0.213 MPa
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☒ 排気ホース、定流量弁
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐		異常ありませんでした
吸湿筒	交換 ☐		
ドレン用フィルタ	交換 ☒	1	
オゾン分解触媒	交換 ☒	1	
定期点検シール	交換 ☒ (貼付)	1	
	交換 ☐		

1-24 年 12 月 20 日

ご署名 医療法人 社団 田 村 医 院

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。