

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

06-07119

No. 130418

配布先	納入先	新鋭工業株式会社 広島支店	殿	機種	ONW-10
客先	所在地	広島県佐伯区坪井 1丁目21-43		機番	001186
環営	ユーザー名	たかいしクリニック	様	納入日	平成19年1月30日
	点検者	小野定之	作業時間	受付日	平成25年3月15日
計	返送先	納入先と同じ		出荷日	平成25年4月18日

修理依頼・苦情内容

- ・インジケータ変色不良

不具合原因（故障箇所）と処置

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

- ・お預かりの間 条件（間欠・連続）を振って20回再現運転を行いました。インジゲータの変色不良は確認出来ませんでした。
- ・性能に関しては、修理・点検内容の通り問題はありませんでした。
- ・給水時 流量が下がり洗浄槽内に水がたまりませんでしたので、給水電磁弁（定流量弁）を確認し異物を除去しました。

写真1）参照

写真1）



- ・インジケータの代品を同梱しましたので、様子をご確認いただけますようお願い致します。

[2] 修理・点検内容部品交換：下表と写真をご参照ください。

1. オゾン水濃度測定：0.47～0.63mg/L・・・正常
2. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：93.7 % 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.126～0.213MPa（AC100V、60Hz）
3. 運転動作確認・・・正常
4. オゾンインジケータ変色・・・正常

一以上一

交換部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
安 25.4.19 田				
審査				
中 25.4.18 澤				
作成				
小 13.4.18 野				