

# 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 25 年 10 月 9 日

|       |  |  |        |   |
|-------|--|--|--------|---|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000                      |  | 製造番号:  | 100258  |
| 作業年月日 | 平成 25 年 10 月 9 日                         |  | 作業時間:  | 1.5 Hr  |
| 顧客名   | あわや内科 クリニック 様                            |  | TEL:   |   |
| 所在地   |  |  | 担当     | 様   |
| 販売店   | 藤井医療器株式会社 様                              |  | 担当     | 様   |
| 納入年月日 | 平成 23 年 9 月 13 日                         | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品    |   |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> | 総合点検 <input type="checkbox"/>                              | 年 回目   | 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/>              |  | 修理表示貼付 | <input type="checkbox"/>                      |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

| 点検項目     |    |  |           |    |   |
|----------|----|--|-----------|----|---|
| フタロック    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>  | 殺菌槽 LED   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>  | エアライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| アルコールライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>  | オゾン水濃度計動作 | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> パルス数 506    |
| オゾンセンサ   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>  | 排水栓、排水ライン | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>  | 細管送水ライン   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>  | 排気ライン     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>  | オゾン濃度     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.69 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>  | 異常音、振動    | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/> | 電源コード     | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>  | 殺菌チューブ類   | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 | <input checked="" type="checkbox"/>  |           | 正常 | <input type="checkbox"/>                        |

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませんでした。

|      |          |    |                  |     |          |        |       |
|------|----------|----|------------------|-----|----------|--------|-------|
| 装置情報 | 交換後運転回数: | 98 | 更新 (リセット) 実施・未実施 | 殺菌: | 2        | 殺菌+アル: | 96    |
|      | リークチェック: | 1  | 自己洗浄:            | 4   | アルコール単独: |        | エア単独: |

| 交換部品名称  | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称 | 部品コード | 交換                       | 数量 |
|---------|-------|-------------------------------------|----|--------|-------|--------------------------|----|
| オゾンセンサー |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 排水栓     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| 脱気スリッパ  |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
| オゾン分解触媒 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |        |       | <input type="checkbox"/> |    |
|         |       | <input type="checkbox"/>            |    |        |       | <input type="checkbox"/> |    |

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 年 月 日

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 栗原 浩一 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
 広島県広島市西区庚午中 4-10-36  
 TEL: 082-275-0740

|       |     |
|-------|-----|
| 責任技術者 | 作業者 |
|       | 増原  |