

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年 2月26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号:	100314	
作業年月日	平成25年 2月 26日		作業時間:	1.5 Hr	
顧客名	中国内科		TEL:		
所在地	広島県広島市安佐北区司部南2-14-14		担当	様	
販売店			担当	様	
納入年月日	平成24年 2月 21日	保証期間	内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/>	付属品	
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/>	総合点検 <input type="checkbox"/>	年 回目	定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/>	
出張・引取	修理 <input type="checkbox"/>			修理表示貼付 <input type="checkbox"/>	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌槽 LED	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
酸素ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	エアライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
アルコールライン	正常 <input type="checkbox"/>	オゾン水濃度計動作	正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 498
オゾンセンサ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排水栓、排水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
給水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	細管送水ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
濃度計流量	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	排気ライン	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
水位センサー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	オゾン濃度	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.76 ppm
水漏れ確認	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	異常音、振動	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
清掃	正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input checked="" type="checkbox"/>	電源コード	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
トレー	正常 <input checked="" type="checkbox"/>	殺菌チューブ類	正常 <input checked="" type="checkbox"/>
殺菌槽コネクタ	正常 <input checked="" type="checkbox"/>		正常 <input type="checkbox"/>

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 427	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 109	殺菌+アル: 318
	リークチェック:	自己洗浄: 142	アルコール単独: 2	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
排水栓		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾン水濃度計		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
脱気フィルター		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	
オゾンセンサー		<input checked="" type="checkbox"/>	1			<input type="checkbox"/>	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島 支店

TEL:

責任技術者	作業者
中原	中原