

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者： 中澤-裕

点検年月日	平成25年11月 7 日	機種名	ONW-10	製造機番	000818
設置場所	1F 眼科内科診察室 奥			TEL : 084-924-2233	
設置時期	平成17年8月12日	運転回数	3682	御対応者	

点検項目	点検結果					
スイッチ類						
電源釦	正常	☒	交換	☐		
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐		
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐		
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐		
ランプ類						
操作パネル	正常	☒	交換	☐		
蛍光灯	正常	☒	交換	☐		
洗浄動作						
フタロック	正常	☒	調整	☐	フタスプリング交換	☒
給水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐	交換	☐
細管洗浄 エアパージ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐	交換	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐	交換	☐
排水	正常	☒	調整	☐	交換	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐	交換	☐
性能確認						
オゾン水濃度	正常	☒	濃度： 0.4 mg/L			
オゾンインジケータ	正常	☒				
酸素発生	正常	☒	濃度： 90.7 % 流量： 0.75 L/min 圧力： 0.114～0.204MPa			
水漏れ確認						
装置外	正常	☒	調整	☐	交換	☐
装置内	正常	☒	調整	☐	交換	☐
清掃						
外装	正常	☒	清掃	☐		
内部	正常	☒	清掃	☒		
洗浄コネクタ	正常	☐	調整	☐	交換	☐
洗浄チューブ	正常	☐	調整	☐	交換	☐

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☒	1	異常ありませんでした
吸湿筒	交換 ☒	1	
ドレン用フィルタ	交換 ☒	1	
オゾン分解触媒	交換 ☒	1	
フタスプリング	交換 ☒	4	
	交換 ☐		

年 月 日

ご署名

印

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。