

## 点検確認書

株式会社 IHIシバウラ  
環境事業部

点検担当者： 中澤 裕

|       |                 |      |        |       |              |
|-------|-----------------|------|--------|-------|--------------|
| 点検年月日 | 平成 25年 12月 18 日 | 機種名  | ONW-10 | 製造機番  | 001230       |
| 設置場所  | 1 F 内視鏡室        |      |        | TEL : | 0846-63-0311 |
| 設置時期  | 平成 18年 12月18日   | 運転回数 | 2745   | 御対応者  |              |

| 点検項目       | 点検結果 |                                     |      |                                                      |
|------------|------|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------|
| スイッチ類      |      |                                     |      |                                                      |
| 電源釦        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>                             |
| フィルタリセット釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>                             |
| 運転/停止釦     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>                             |
| アルコールモード釦  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>                             |
| ランプ類       |      |                                     |      |                                                      |
| 操作パネル      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>                             |
| 蛍光灯        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 交換   | <input type="checkbox"/>                             |
| 洗浄動作       |      |                                     |      |                                                      |
| フタロック      | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 給水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 順方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 逆方向   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 細管洗浄 エアパージ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| アルコールフラッシュ | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| オゾン分解ファン   | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 排水         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 異常音、振動     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 性能確認       |      |                                     |      |                                                      |
| オゾン水濃度     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度 : | 0.4 mg/L                                             |
| オゾンインジケータ  | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> |      |                                                      |
| 酸素発生       | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 濃度 : | 92.3 % 流量 : 0.73 L/min 圧力 : 0.102~0.186 MPa          |
| 水漏れ確認      |      |                                     |      |                                                      |
| 装置外        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 装置内        | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 清掃         |      |                                     |      |                                                      |
| 外装         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃   | <input type="checkbox"/>                             |
| 内部         | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 清掃   | <input type="checkbox"/>                             |
| 洗浄コネクタ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |
| 洗浄チューブ     | 正常   | <input checked="" type="checkbox"/> | 調整   | <input type="checkbox"/> 交換 <input type="checkbox"/> |

| 交換部品     |    |                                     | 数量 | コメント       |
|----------|----|-------------------------------------|----|------------|
| 吸着筒      | 交換 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 異常ありませんでした |
| 吸湿筒      | 交換 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |            |
| ドレン用フィルタ | 交換 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |            |
| オゾン分解触媒  | 交換 | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |            |
|          | 交換 | <input type="checkbox"/>            |    |            |
|          | 交換 | <input type="checkbox"/>            |    |            |

H25 年 12 月 18 日

ご署名 有限法人 社団 田 村 医 院



※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。