

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：

点検年月日	平成25年11月8日	機種名	ONW-10	製造機番	000836
設置場所	1F 内視鏡室			TEL	084-947-1177
設置時期	平成 17年 8月 31日	運転回数	3871	御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常	☒	交換	☐
フィルタリセット釦	正常	☒	交換	☐
運転/停止釦	正常	☒	交換	☐
アルコールモード釦	正常	☒	交換	☐
ランプ類				
操作パネル	正常	☒	交換	☐
蛍光灯	正常	☒	交換	☐
洗浄動作				
フタロック	正常	☒	調整	☐
給水	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 順方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 逆方向	正常	☒	調整	☐
細管洗浄 エアバージ	正常	☒	調整	☐
アルコールフラッシュ	正常	☒	調整	☐
オゾン分解ファン	正常	☒	調整	☐
排水	正常	☒	調整	☐
異常音、振動	正常	☒	調整	☐
性能確認				
オゾン水濃度	正常	☒	濃度：0.43 mg/L	
オゾンインジケータ	正常	☒		
酸素発生	正常	☒	濃度：91.7 % 流量：0.76 L/min 圧力：0.111～0.194 MPa	
水漏れ確認				
装置外	正常	☒	調整	☐
装置内	正常	☒	調整	☐
清掃				
外装	正常	☒	清掃	☐
内部	正常	☒	清掃	☐
洗浄コネクタ	正常	☒	調整	☐
洗浄チューブ	正常	☒	調整	☐

交換部品	数量	コメント
吸着筒	1	異常ありをばいでした
吸湿筒	1	
ドレン用フィルタ	1	
オゾン分解触媒	1	

平成25年 11月 8日

〒121-5513 東京都山手区山手1丁目60番20号

医療法人社団純粋会 石原内科胃腸科

ご署名

石

原

健

石

原

印

TEL 0847-67-2112

※：本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。