

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

06-07936

No. 140306

配布先	納入先	新鋭工業（株） 広島支店 殿			機種	ONW-10
客先	所在地	山口県岩国市美和町佐坂 370-1			機番	001374
環営	ユーザー名	近藤医院 様			納入日	平成 20 年 06 月 29 日
	点検者	中澤一裕	作業期間	1/27～3/6	受付日	平成 26 年 1 月 27 日
計	返送先	納入先と同じ			出荷日	平成 26 年 3 月 6 日

修理依頼・苦情内容

水漏れ

工場にて通電したところ、エラー 2（洗浄中水位低下、水漏れ）の痕跡を確認しました。

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果

水漏れにつきまして

お預かりしている間、以下の確認をしましたが、エラー 2 および水漏れはありませんでした。

- ・水槽に水を張った状態・・・2 週間静置
- ・水位センサーの動作確認およびテストモード運転・・・2 時間実施
- ・洗浄運転・・・10 回実施

排水シリコンチューブが劣化するとエラー 2 の発生原因になりますので、念のために交換しました。 洗浄チューブ、給水、排水ホースの接続をご確認いただき、様子を見てくださいますようお願いいたします。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

1. 部品交換：下表と写真をご参照ください。
2. オゾン水濃度測定：0.52～0.61 mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.5% 酸素流量：0.79 L/min 圧力：0.092～0.160 MPa（AC100V、60Hz）
4. 運転動作確認・・・正常
5. オゾンインジケータ変色・・・正常

承認



審査



作成

H26.3.6
中澤

交換部品

	部品名称	数量	備考
1～3	定期交換部品	1 式	
	吸着、吸湿筒、触媒、ドレンフィルタ		
4	排水シリコンチューブ	1 本	無償