

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成25年11月12日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号:	100312		
作業年月日	平成25年11月12日	作業時間:	1.5 Hr		
顧客名	木原病院 様	TEL:			
所在地		担当	様		
販売店	エビメ酸素(株)	担当	倉田 様		
納入年月日	平成23年11月7日	保証期間	内 ☐ 外 ☒	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入	☒		
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付	☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 448
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数: 17	更新(リセット)実施・未実施	殺菌: 19	殺菌+アル: 233
	リークチェック: 212	自己洗浄: 160	アルコール単独: 0	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	内視鏡接続管		☒	1
排水栓		☒	1			☐	
オゾン水濃度計		☒	1			☐	
脱気バルブ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

25.11.12

年 月 日

今治市別宮町三丁目7番地の8
医療法人 聖ルカ会 木原病院
ご署名修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者 作業者

木原