

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140520

発行日 平成 26年 5月 20日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300035 「B」
作業年月日	平成26年 5月 20日		作業時間:	Hr
顧客名	三次地区医療センター 様		TEL:	0824-62-1103
所在地	広島県三次市十日市東3丁目16-1		担当	様
販売店	成和産業(株) 三次営業所 様		担当	様
納入年月日	平成 25年 6月 3日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☒		
(出張)・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守 1 回目

不具合原因、作業内容

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 493
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

異常ありませしてし

装置 情報	交換後運転回数: 1541	更新(リセット) (実施)・未実施	消毒: 947	消毒+7L: 594
	リークチェック: 636	自己洗浄: 228	7L-1単独: 30	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	コネクタ		☒	2
排水栓		☒	1	給水フィルタ		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	排水フィルタ		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

h26 年 5 月 20 日

ご署名

鈴木 富美



修理業者 株式会社 IHI シバウラ 岡山事業所
岡山県岡山市東区西大寺新地 170-6
TEL: 086-944-6528

責任技術者

作業者

