

保守点検・修理 報告書

管理 No. 20140627
発行日 平成 26年 6月 27日

販売名	オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S		製造番号:	300160
作業年月日	平成26年 6月 27日		作業時間:	Hr
顧客名	山内病院 様		TEL:	0898-32-3000
所在地	愛媛県今治市片山町3-1-40		担当	様
販売店	(株)アイコーメディカル 様		担当	様
納入年月日	平成 25年 12月 9日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目		定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐		修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

6/18 から 排水逆流が13回発生 6/23 排水異常1(E401) 6/27 排水異常
6/23 から オゾン水生成逆流が7回発生。同日 濃度計異常(E:302)

不具合原因、作業内容

排水逆流、異常 ... 排水フィルタが詰まっていた。
オゾン水生成逆流 } ... 濃度計用フィルタが詰まっていた。
濃度計異常 }

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ ホンバ 3.7 Mpa	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 538
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒ ストリーナ 清掃	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒ アースなし
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了)、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置 情報	交換後運転回数: 257	更新(リセット)実施・未実施	消毒: 107	消毒+7L: 151
	リークチェック: 0	自己洗浄: 125	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐	1	コネクタ		☐	2
排水栓		☐	1	給水フィルタ		☐	1
オゾン水濃度計		☐	1	排水フィルタ(粒状型)		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ(40μm)		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☐	1			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 岡村 梨枝

修理業者 株式会社 IHIシバウラ 岡山事業所 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6 TEL: 086-944-6528	責任技術者	作業者

1:タッチパネル画面

装置情報		戻る
型式	OED-1000S	
製造番号	300160	
プログラム	Ver. 0204/102BV	
納入年月日	13/12/09	
前回定期交換日	13/12/09	
交換後運転回数	257	
運転回数(消毒)	107	
運転回数(消毒+アル)	151	
運転回数(リークチェック)	0	
運転回数(自己洗浄)	125	
運転回数(アルコール単独)	0	
運転回数(エア単独)	0	
		2014/06/27

		異常履歴		消去	
Date	Time	Error			Ct
06/24	10:37	お"水生成注意	(E:110)		7
06/24	10:48	排水注意	(E:111)		13
06/24	11:44	お"水生成注意	(E:110)		7
06/24	11:51	お"水生成異常	(E:207)		1
06/25	11:05	排水注意	(E:111)		13
06/26	11:16	排水注意	(E:111)		13
06/26	12:34	排水注意	(E:111)		13
06/27	10:53	排水注意	(E:111)		13
06/27	10:54	排水異常1	(E:401)		2
06/27	12:16	排水注意	(E:111)		13
		↑	↓	USB	2014/06/27

2:設置場所全景



3:機械背面側 排水フィルター周辺



4:給水、排水 周辺

