

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成26年10月20日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000		製造番号	300060
作業年月日	平成26年10月20日		作業時間	1.0 Hr
顧客名	ミモリクリニック		TEL	0847-22-0222
所在地	広島県世羅郡世羅町寺町1557-2		担当	様
販売店	西洋医療器(株)		担当	新川 様
納入年月日	平成25年9月12日	保証期間	内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒	総合点検 ☐	年 / 回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴			
定期保守点検(1回目)			
不具合原因、作業内容			
オゾン濃度計, 分解触媒, 脱気フィルター, 排水栓, 吸盤 交換			
点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数 329
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項			
洗浄に問題ありませ。大変安全に使っていただいております。ありがとうございました。			

装置 情報	交換後運転回数	93	更新(リセット)実施・未実施	殺菌	11	殺菌+アル	20
	リークチェック	0	自己洗浄	アルコール単独	0	エア単独	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期交換部品		☐				☐	
		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄	
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。 ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
年	月 日
ご署名	池田 啓子

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
松本	松本