

修理報告書（引取り修理）

修理依頼番号

06-08742

No. 141128

納入先	新鋭工業株式会社 広島支店 殿			機種	ONW-10
所在地	広島県広島市佐伯区五日市中央3丁目9-51			機番	000718
ユーザー名	名草胃腸科・外科クリニック 様			納入日	平成17年9月3日
点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成26年11月4日
返送先	納入先と同じ			出荷日	平成26年11月28日

修理依頼・不具合内容

オゾンインジケータ 変色不良

不具合原因（故障箇所）と処置

〔1〕点検結果（不具合箇所と不具合原因）

機械の性能に異常はありませんでした。

インジケータの変色状態も、ばらつきの範囲内で異常ありませんでした。

念のためにインジケータの変色に影響する部品（吸着筒・吸湿筒）を再交換しました。
これで様子を見てくださいますようお願いいたします。

写真：交換部品一式



〔2〕修理・点検内容

1. オゾン水濃度測定：0.48～0.61 mg/L・・・正常

2. PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常

酸素濃度：93.7% 酸素流量：0.76 L/min 圧力：0.088～0.160 MPa（AC100V 60Hz）

3. 運転動作確認・・・正常

4. オゾンインジケータ変色・・・正常

※別紙にインジケータの現物を添付しています。

承認



審査



作成

H26. 11. 28

中澤

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	吸着筒・吸湿筒	1式	SPS11558⇒11686
	アルコールタンクキャップ	1個	
	フタスプリング	1式	