

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

06-08933

No. 141206

配布先	納入先	新鋭工業（株） 広島支店 殿		機種	ONW-10
客先	所在地	広島県三原市大和町和木1537		機番	000549
環営	ユーザー名	大和診療所 様		納入日	平成16年11月1日
防品	点検者	中澤一裕	作業時間	受付日	平成26年12月1日
計	返送先	納入先と同じ		発送日	平成26年12月8日

修理依頼・苦情内容

異音発生（ポンプ内部の回転部分が擦れて大きな音がする）

不具合原因（故障箇所）と処置予定

[1] 点検結果（不具合箇所と不具合原因）

本機には水ポンプが3台搭載されています。このうちオゾン水製造ポンプ（P-1）から大きな音が発生するのを確認しました。
ご使用開始から10年になるため、残り2台のポンプも交換しました。

写真：交換部品一式



[2] 修理・点検内容

- 部品交換：下表と写真をご参照ください。
- オゾン水濃度測定：0.42～0.60mg/L・・・正常
- PSA（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.9% 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.108～0.199 MPa（AC100V, 60Hz）
- 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし
- 運転カウンタ：1827

一以上一

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	水ポンプ（P-1）	1台	オゾン水製造ポンプ
	水ポンプ（P-2）	1台	内視鏡洗浄ポンプ
	水ポンプ（P-3）	1台	排水ポンプ
	ドレンフィルター	1個	

承認



審査



作成

H26.12.6

中澤