

管理 No.

保守点検・修理 報告書

発行日 平成26年4月1日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000	製造番号: 100314
作業年月日	平成26年4月1日	作業時間: 1.5 hr
顧客名	中岡内科	TEL: 082-819-3701
所在地	広島県広島市浪佐北区可部南2丁目14-14	担当
販売店	マジナルマテカル	担当 大番 様
納入年月日	平成12年2月20日	保証期間 内 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 修理 ☐	総合点検 ☐ 年 回目
出張・引取	修理 ☐	定期点検シール記入 ☒ 修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

得になし

不具合原因、作業内容

得になし

点検項目			
フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ ハズ数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.73 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

非常にきれいにご使用 いただいております。ありがとうございました。

装置情報	交換後運転回数: 0	更新 (リセト) (実施) ・未実施	殺菌: 250	殺菌+7L: 662
	リークチェック: 0	自己洗浄: 294	7L単独: 8	エア単独: 1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒	☒		1			☐	
排水栓	☒		1			☐	
オゾン濃度計 版 2019	☒		1			☐	
オゾンセンサー	☒		1			☐	
内視鏡 接続ケーブル	☒		2			☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

26年4月1日

ご署名 松平 やあ子



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	井口	作業者	松植
-------	----	-----	----