

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日 平成 27 年 8 月 21 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号:	300362
作業年月日	平成 27 年 8 月 21 日				作業時間:	1 Hr
顧客名	向井 ケリニ 様				TEL:	0829-50-6166
所在地	広島県廿日市市前空 5-3-16				担当	院長
販売店	富田 ファミリーサービス (株)				担当	吉原
納入年月日	平成 26 年 8 月 18 日	保証期間	内	外	付属品	
作業区分	保守点検	☒	総合点検	☐	年 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理	☐				修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

定期保守点検

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコーラライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ H ₂ O2 数 548
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☐ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

装置情報	交換後運転回数:	674	更新 (リット) (実施) ・未実施	殺菌:	1	殺菌+7L:	678
	リークチェック:	117	自己洗浄:	52	7Lコ-ル単独:	0	エア単独:

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
保守点検		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2015 年 8 月 21 日

ご署名 向井 ケリニ 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午 4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

印