

管理 No.

発行日 平成27年10月27日

保守点検・修理 報告書

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000			製造番号:	300361
作業年月日	平成27年10月27日			作業時間:	1
顧客名	光市立 本知総合病院 科			TEL:	
所在地	水戸県光市菅田994			担当	
販売店	三郷正務店			担当	富士
納入年月日	平成26年10月21日	保証期間	内 1 年 外 1 年	付属品	
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	1 年 1 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐	修理表示貼付 ☐			

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

定期保守点検部品の交換

点検項目

フタロツク	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライオン	正常 ☒	エアライオン	正常 ☒
アルコールライオン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 306
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライオン	正常 ☒
給水ライオン	正常 ☒	細管送水ライオン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライオン	正常 ☒
水位センサ	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 1.88 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒		正常 ☐

作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

交換部品は正常に動作し、302-14 5070 確認

装置情報	交換後運転回数:	1439	更新 (リセット) 実施:	未実施	殺菌:	604	殺菌+7W:	835
	リークチェック:	832	自己洗浄:	232	7W単独:	1	エア単独:	0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
定期保守部品		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成27年10月27日

ご署名 印

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36

TEL: 082-275-0740

責任技術者

作業者

印