

來世無常。諸君

管理 No.

発行日 平成27年10月14日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000				製造番号:	300185	
作業年月日	平成27年10月14日				作業時間:		
顧客名	藤井雅環内科 藤				TEL:	082-252-0133	
所在地	広島県広島市南区平田2-14-24				担当	院長先生	
販売店	藤井正康 歯科 (特)				担当	様	
納入年月日	平成26年1月17日	保証期間	内	外	付属品		
作業区分	保守点検 ☒	総合点検	☐	2年2回目	定期点検より記入	☐	
出張・引取	修理 ☐					修理表示貼付	☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴					
不具合原因、作業内容 保守と点検交換部品の記録					
点検項目					
フタロツク	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライオン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 525
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.90 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異音・振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒			
作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項 大株をセルに使用したため、培養の遅延あり。 富ヶ谷のみの観察がポイント外。					

装置 情報	交換後運転回数：468		更新 (Y/N)：(実施) ・ 未実施	殺菌：946	殺菌+7L：0		
	リークチェック：0	自己洗浄：346	殺菌：7L-1単独：0	エア単独：0			
交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
床下交換部品		☒	1			☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	
		☐				☐	

お客様へ確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

「神谷」

27年 10月 14日



修理業者

新鋭工業株式会社 広島支店

TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
	