

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成28年4月17日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：300189
作業年月日	平成28年4月7日		作業時間：1 Hr
顧客名	山口県下関市安国駅前1-10-27 様		TEL：0832-58-0257
所在地	山口県下関市安国駅前1-10-27 様		ご担当 様
販売店	有限新和医療株式会社		ご担当 様
納入年月日	平成26年3月18日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

アタッチメント 1本不良

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ パルス数 62.1
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.7 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒ アタッチメント 1本不良
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

アタッチメント 1本不良 他は異常ありませんでした。
お問い合わせに迅速に対応いただきありがとうございます。

装置情報	交換後運転回数：447	更新（リセット）実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒：272	殺菌/消毒+7L：600
	リークチェック：598	自己洗浄：506	アルコール単独：	エア単独：

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒	定期交換品	☒	1	吸盤	定期交換品	☒	1
排水栓	4	☒	1	接続コネクタ：水槽側	1	☒	1
オゾン水濃度計	4	☒	1	接続コネクタ：チューブ側	1	☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ	4	☒	1			☐	
オゾンセンサー	4	☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

28年4月7日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 柴田 紀子 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
井田	井田