

修理報告書（引取り修理）

修理依頼
番号

06-09922

No. 160408

納入先	新鋭工業（株） 広島支店 殿			機種	ONW-10
所在地	広島県安芸郡府中町鹿籠2-13-6			機番	001806
ユーザー名	小山田内科医院 様			納入日	平成21年9月16日
点検者	中澤一裕	作業時間		受付日	平成28年3月7日
返送先	納入先と同じ			発送日	平成28年3月26日

不具合内容

各部点検 （フィルターランプ点灯；運転回数 1500 回お知らせ）

不具合原因（故障箇所）と処置

定期交換部品を含めて性能が劣化した部品を交換しました。

写真：交換部品一式



修理・点検内容

1. 部品交換・・・下表と写真をご参照ください
2. オゾン水濃度測定：0.50～0.61 mg/L・・・正常
3. P S A（酸素発生装置）性能点検・・・正常
酸素濃度：92.9 % 酸素流量：0.75 L/min 圧力：0.095～0.174 MPa（AC100V, 60Hz）
4. 運転確認 異常なし。インジケータ変色 異常なし

交換部品

No.	部品名称	数量	備考
1～3	定期交換部品	1 式	
	酸素発生装置：吸着筒、吸湿筒		PSA；SPS-11945
	ドレンフィルタ		
	オゾン分解触媒		
4	配管チューブ、パッキン	1 式	

承認



審査



作成

H28. 4. 8
中澤