

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 28 年 10 月 26 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300888
作業年月日	平成 28 年 10 月 26 日	作業時間：Hr
顧客名	岡沢医院 様	TEL：0825-22-6516
所在地	山口県防府市西仁井令2-10-1	ご担当 様
販売店	テ-エスワフレス(株)	ご担当 恵馬 様
納入年月日	平成 26 年 11 月 28 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目	定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

定期保守点検

不具合原因、作業内容

定期保守点検部品交換。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 399
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

好に異常なし。大変きれいに御使用、1年ほど有難うございます。

装置情報	交換後運転回数：89	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒：2	殺菌/消毒+7L：162
	リークチェック：6	自己洗浄：84	7Lアルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☐	
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

28.10.26
山口県防府市西仁井令二丁目10番1
岡沢医院

ご署名 岡 澤 寛 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
	植 直

Ver.3.1