

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年 4月 13日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300027
作業年月日	平成 29 年 4 月 13 日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	岡田外科医院 様		TEL：082-281-2802
所在地	広島県広島市南区段原山崎2-9-22		ご担当 様
販売店	藤井医療器(株)		ご担当 飯倉 様
納入年月日	平成 25 年 4 月 30 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 4年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
光量低下異常	
不具合原因、作業内容	
保守点検部品 + コントロール基板交換	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☒ パルス数 807
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☒ 履歴 0.72 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☒
清掃 正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード 正常 ☒
トレー 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項	
上記工程・内容以外 特に異常なし。部品交換にて対応致しました。	

装置 情報	交換後運転回数：	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：408	殺菌/消毒+7L：3/2
	リークチェック：1	自己洗浄：37	アルコール単独：6	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	コントロール基板		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	29年 4月 13日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 小田 大祐	印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
 広島県広島市西区庚午中4-10-36
 TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
	飯倉