

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 5 月 22 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300881
作業年月日	平成 29 年 5 月 22 日		作業時間：Hr
顧客名	徳山病院 様		TEL：0834-21-3750
所在地	山口県周南市新宿通 1-16		ご担当 様
販売店	富士フィルムメディカル(株)		ご担当 田中 様
納入年月日	平成 28 年 5 月 30 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張 (引取)	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

水漏れ、保守点検。

不具合原因、作業内容

水漏れ確認の為試運転、保守点検部品の交換。

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

現状水漏れ確認できませんでした。その他異常なし、大変きれいに御使用
いただき有難うございます。

装置 情報	交換後運転回数：417	更新 (リセット) 実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒：280	殺菌/消毒+7L：1.7
	リークチェック：1	自己洗浄：45	アルコール単独：1.5	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒		吸盤		☐	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒		接続コネクタ：チューブ側		☐	
ポン水濃度計用フィルタ		☒				☐	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

29 年 5 月 23 日

ご署名 田中 留美子



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
	植