

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年5月29日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300271
作業年月日	平成29年5月29日	作業時間：1 Hr
顧客名	後藤外科胃腸科肛門科医院 様	TEL：082-85-0005
所在地	山口県下関市堀田町1-20-11	ご担当 様
販売店	テニス3ホール(株) 下関機器試薬支店	ご担当 矢本 様
納入年月日	平成26年4月2日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3年3回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検部品の交換、排水フィルター交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 502
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常なし。大変スムーズに御使用いただき有難うございます。

装置情報	交換後運転回数：578	更新（リセット） ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒：1758	殺菌/消毒+7L：0
	リークチェック：0	自己洗浄： ☒	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	2
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

平成29年5月29日
後藤外科胃腸科肛門科医院

ご署名 院長 後藤 博 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
	柏 慎

Ver.3.1