

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年8月8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300598
作業年月日	平成29年8月4日		作業時間：1.0 Hr
顧客名	石原内科胃腸科 様		TEL：084-947-1177
所在地	広島県福山市幕山台 1-20-20		ご担当 様
販売店	福山医療器(株)		ご担当 高田 様
納入年月日	平成27年6月29日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年2回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

29年度定期メンテナンス実施

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 278	エアライン	正常 ☒ 33~34
アルコールライン	正常 ☒ →アルコールキャップ交換	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 64/
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒ 水温 29℃	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありません。

装置情報	交換後運転回数：662	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：635	殺菌/消毒+アル：606
	リークチェック：289	自己洗浄：610	アルコール単独：0	エア単独：3

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ；水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ；チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールキャップ	新型（青）	☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒721-0913 広島県福山市幕山台一丁目20番20号
医療法人社団 健朗会 石原内科胃腸科

石原 健二

ご署名

TEL (084) 947-1177

修理業者

新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者

作業者

増原

福田

Ver.3.1