

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年6月19日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：300870
作業年月日	平成29年6月19日	作業時間：1.5 Hr
顧客名	土井クリニック様	TEL：082-814-3211
所在地	広島市安佐北区可部2-40-22	ご担当 様
販売店	横地医療器(株)	ご担当 池浦 様
納入年月日	平成28年5月31日	保証期間 内 ☒ 外 ☐
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 1年/回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H29年度 定期保守点検 実施.

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 285	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 433
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題なし

排水確認済

装置情報	交換後運転回数：85	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：11	殺菌/消毒+7L：24
	リークチェック：0	自己洗浄：20	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 29. 6. 19 日

ご署名

平田 滋



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者