

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年7月26日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300930
作業年月日	平成29年7月26日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	松本内科胃腸科医院 様		TEL：0848-45-2277
所在地	広島県尾道市向東町3570-5		ご担当 様
販売店	五洋医療器(株)		ご担当 様
納入年月日	平成28年8月1日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 / 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

H29年7/25 オゾン水生成注意 (E=110) x2 生成異常 (E=207) x1

不具合原因、作業内容

H29年度 定期メンテナンス実施 (初年度中-08) 排水フィルター有

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 320	エアライン	正常 ☒ 33~34 kPa
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 335
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒ 水温 31℃	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.66 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレー	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありません、水温に今後注意を願います。

装置情報	交換後運転回数：177	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：3	殺菌/消毒+アル：174
	リークチェック：0	自己洗浄：49	アルコール単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	1
オゾン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	1
オゾン水濃度計用フィルタ		☒	1	排水フィルター（旧）		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2017.7.26 年 月 日

ご署名 松本勇次



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者