

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年10月18日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号: 300375
作業年月日	平成29年10月18日	作業時間: 1 Hr
顧客名	秀浦医院 様	TEL: 0833-41-5225
所在地	山形県下松市生野屋西1-5-17	ご担当 様
販売店	テ-エスエフ(株)岡南支店	ご担当 様
納入年月日	平成26年10月1日 保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年3回目 定期点検シール記入 ☒	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検部品の交換

点検項目

フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☐	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 205
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.68 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒ 清掃 ☐	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常なし。大変至れり尽くせり使用ハズレは有難うございます。

装置情報	交換後運転回数: 136	更新(リセット)実施 ☒ 未実施 ☐	殺菌/消毒: 17	殺菌/消毒+7L: 509
	リークチェック: 4	自己洗浄: 2	アルコール単独: 0	エア単独: 0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポンプ分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ: 水槽側		☐	
ポンプ水濃度計		☒	1	接続コネクタ: チューブ側		☒	2
ポンプ水濃度計用フィルタ		☒	1			☐	
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- 本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

29年10月18日

ご署名

秀浦 信太郎 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL: 082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	植

Ver.3.1