

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年 / 月 / 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300502
作業年月日	平成 30 年 / 月 17 日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	エフエフクリニック様		TEL：0822-42-7722
所在地	山形県下関市田中町4-10		ご担当 様
販売店	アイテ-34(特) 山形営業所		ご担当 白谷 様
納入年月日	平成 27 年 3 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 3 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検部品交換

点検項目					
フタロック	正常	☒	殺菌槽 LED	正常	☒
酸素ライン	正常	☒	エアライン	正常	☒
アルコールライン	正常	☒	オゾン水濃度計動作	正常	☒ バルブ数 480
オゾンセンサ	正常	☒	排水栓、排水ライン	正常	☒
給水ライン	正常	☒	細管送水ライン	正常	☒
濃度計流量	正常	☒	排気ライン	正常	☒
水位センサー	正常	☒	オゾン濃度	正常	☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常	☒	異常音、振動	正常	☒
清掃	正常	☒	電源コード	正常	☒
トレー	正常	☒	殺菌チューブ類	正常	☒
殺菌槽コネクタ	正常	☒	マニホールド周辺チューブ	正常	☒
		☐			☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

給水異常あり、下流エアーに押込用頂上有線ケーブルに接続済み。
※ トレーの作は後日報告致します。

装置情報	交換後運転回数：1595	更新（リセット）実施・未実施	殺菌/消毒：1335	殺菌/消毒+7L：1536
	リークチェック：943	自己洗浄：772	アルコール単独：66	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	1
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	3100-0101 70		☒	1
オゾンセンサー		☒	1	排水チューブ（10）		☒	1

お客様ご確認署名欄

H 30 年 1 月 17 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

ご署名 藤野 印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
増原	藤野