

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 29 年 10 月 17 日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300528
作業年月日	平成 29 年 10 月 17 日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	箕岡内科医院 様		TEL：0824-62-3183
所在地	広島県三次市三次町1900-1		ご担当 様
販売店	ティーエスアルコレッサ(株)		ご担当 宮脇 様
納入年月日	平成 27 年 10 月 29 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 2 年 2 回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H29年度定期メンテナンス実施 (今回限り無償)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒ 285	エアライン	正常 ☒ 34~35
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ 579 パルス数
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.69 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☐	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に問題ありません。

装置情報	交換後運転回数：64	更新（リセット）実施 ☒ ・未実施 ☐	殺菌/消毒：2	殺菌/消毒+7L：114
	リークチェック：0	自己洗浄：177	アルコール単独：0	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ワゴン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☐	
ワゴン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☐	
ワゴン水濃度計用フィルタ		☒	1	アルコールランプ	(ブルー)	☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2017 年 10 月 17 日

貴岡 厚 印

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
福内	福原

Ver.3.1