

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成29年10月23日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☒ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☐		製造番号：100375
作業年月日	平成29年10月23日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	くさた7リニ,7 様		TEL：0839-21-6220
所在地	山口県山口市黒川771-11		ご担当 様
販売店	吉岡 x ディパワ		ご担当 様
納入年月日	平成24年5月16日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 5年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴

液晶パネルの表示が不明、(2017年10月23日AM)

不具合原因、作業内容

液晶パネル、コントロール基板 劣化劣化の為交換。(有償)

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ パネル数 455
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.70 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果(完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項

液晶パネル、コントロール基板 交換により対応。

装置 情報	交換後運転回数：1418	更新(リセット)実施・未実施	殺菌/消毒：1281	殺菌/消毒+7L：137
	リークチェック：0	自己洗浄：1	アルコール単独：0	エア単独：1

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☐		吸盤		☐	
排水栓		☐		接続コネクタ：水槽側		☒	2
オゾン水濃度計		☐		接続コネクタ：チューブ側		☐	
オゾン水濃度計用フィルタ		☐		液晶パネル		☒	1
オゾンセンサー		☐		コントロール基板		☒	1

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

29年10月23日

ご署名

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者

作業者

責任技術者 吉岡	作業者 吉岡
-------------	-----------