

## 保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成 30 年 2 月 27 日

|       |                                                                                                                               |                                                                       |                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|
| 販売名   | オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 <input type="checkbox"/> オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S <input checked="" type="checkbox"/>                         |                                                                       | 製造番号：300442      |
| 作業年月日 | 平成 30 年 2 月 27 日                                                                                                              |                                                                       | 作業時間：1.5 Hr      |
| 顧客名   | はいとろ内科循環器科 様                                                                                                                  |                                                                       | TEL：082-815-3628 |
| 所在地   | 広島市安芸区可部 5-4-24                                                                                                               |                                                                       | ご担当 様            |
| 販売店   | 吉岡 X-ray                                                                                                                      |                                                                       | ご担当 様            |
| 納入年月日 | 平成 27 年 1 月 23 日                                                                                                              | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input checked="" type="checkbox"/> | 付属品              |
| 作業区分  | 保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 3 年 3 回目 定期点検シール記入 <input checked="" type="checkbox"/> |                                                                       |                  |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>        |                                                                       |                  |

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合原因、作業内容

H 30 年、定期メンテナンス実施

点検項目

|          |                                                                    |              |                                                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------|
| フタロック    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌槽 LED      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 酸素ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 317                         | エアライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 33~34       |
| アルコールライン | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン水濃度計動作    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> バルブ数 520    |
| オゾンセンサ   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排水栓、排水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 給水ライン    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 細管送水ライン      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 濃度計流量    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 排気ライン        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 水位センサー   | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | オゾン濃度        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 履歴 0.72 ppm |
| 水漏れ確認    | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 異常音、振動       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 清掃       | 正常 <input checked="" type="checkbox"/> 清掃 <input type="checkbox"/> | 電源コード        | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| トレー      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | 殺菌チューブ類      | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
| 殺菌槽コネクタ  | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>                             | マニホールド周辺チューブ | 正常 <input checked="" type="checkbox"/>             |
|          | <input type="checkbox"/>                                           |              | <input type="checkbox"/>                           |

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

動作点検後、特に問題なし。

|          |             |                |           |              |
|----------|-------------|----------------|-----------|--------------|
| 装置<br>情報 | 交換後運転回数：474 | 更新（リセット）実施・未実施 | 殺菌/消毒：906 | 殺菌/消毒+7L：376 |
|          | リークチェック：0   | 自己洗浄：91        | アルコール単独：0 | エア単独：0       |

| 交換部品名称      | 部品コード | 交換                                  | 数量 | 交換部品名称       | 部品コード | 交換                                  | 数量 |
|-------------|-------|-------------------------------------|----|--------------|-------|-------------------------------------|----|
| ポン分解触媒      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 吸盤           |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 3  |
| 排水栓         |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：水槽側   |       | <input type="checkbox"/>            |    |
| ポン水濃度計      |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 接続コネクタ：チューブ側 |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 2  |
| ポン水濃度計用フィルタ |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  | 排水バルブ        | 新→旧   | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |
| オゾンセンサー     |       | <input checked="" type="checkbox"/> | 1  |              |       | <input type="checkbox"/>            |    |

お客様ご確認署名欄

年 月 日

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名



修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店  
広島県広島市西区庚午中4-10-36  
TEL：082-275-0740

| 責任技術者 | 作業者 |
|-------|-----|
|       |     |

Ver.3.1