

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年3月8日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒		製造番号：300786
作業年月日	平成30年3月8日		作業時間：1.5 Hr
顧客名	桃崎病院 様		TEL：082-32-2533
所在地	山口県下関市田中町1-10		ご担当 様
販売店	株式会社 MVC		ご担当 様
納入年月日	平成28年3月10日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年1回目 定期点検シール記入 ☒		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

不具合状況、依頼内容、異常履歴	
保守点検	
不具合原因、作業内容	
保守点検 部品交換 (無償)	
点検項目	
フタロック 正常 ☒	殺菌槽 LED 正常 ☒
酸素ライン 正常 ☒ 310	エアライン 正常 ☒
アルコールライン 正常 ☒	オゾン水濃度計動作 正常 ☐ バルブ数 394
オゾンセンサ 正常 ☒	排水栓、排水ライン 正常 ☒
給水ライン 正常 ☒	細管送水ライン 正常 ☒
濃度計流量 正常 ☒	排気ライン 正常 ☒
水位センサー 正常 ☒	オゾン濃度 正常 ☐ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認 正常 ☒	異常音、振動 正常 ☐
清掃 正常 ☐ 清掃 ☐	電源コード 正常 ☒
トレイ 正常 ☒	殺菌チューブ類 正常 ☒
殺菌槽コネクタ 正常 ☒	マニホールド周辺チューブ 正常 ☒
☐	☐
作業結果 (完了、暫定処理など)、連絡事項、特記事項	
特に異常なし、大変スムーズに御使用頂いております。	

装置情報	交換後運転回数：148	更新 (リセット) ☒ 実施・未実施	殺菌/消毒：9	殺菌/消毒+7L：348
	リークチェック：349	自己洗浄：302	7L単独：1	エア単独：2

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポン分解触媒		☒	1	吸盤		☒	3
排水栓		☒	1	接続コネクタ：水槽側		☒	2
ポン水濃度計		☒	1	接続コネクタ：チューブ側		☒	2
ポン水濃度計用フィルタ		☒	1	替管		☒	1
オゾンセンサー		☒	1			☐	

お客様ご確認署名欄	平成30年3月8日
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。	
・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。	
ご署名 濱崎 伸一	責任技術者 濱崎 伸一

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
濱崎 伸一	濱崎 伸一