

保守点検・修理 報告書

管理 No.

発行日：平成30年3月9日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機 OED-1000 ☐ オゾン水内視鏡消毒機 OED-1000S ☒	製造番号：200734
作業年月日	平成30年3月9日	作業時間：1 Hr
顧客名	札幌病院様	TEL：082-231-1131
所在地	広島県広島市西区天満町8-7	ご担当 様
販売店	共和医療器具(株) 広島支店	ご担当 様
納入年月日	平成28年2月22日	保証期間 内 ☐ 外 ☒
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 2年2回目	定期点検シール記入 ☒
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐

不具合状況、依頼内容、異常履歴

保守点検

不具合原因、作業内容

保守点検部品、排水フィルター交換

点検項目

フタロック	正常 ☒	殺菌槽 LED	正常 ☒
酸素ライン	正常 ☒	エアライン	正常 ☒
アルコールライン	正常 ☒	オゾン水濃度計動作	正常 ☒ バルブ数 482
オゾンセンサ	正常 ☒	排水栓、排水ライン	正常 ☒
給水ライン	正常 ☒	細管送水ライン	正常 ☒
濃度計流量	正常 ☒	排気ライン	正常 ☒
水位センサー	正常 ☒	オゾン濃度	正常 ☒ 履歴 0.71 ppm
水漏れ確認	正常 ☒	異常音、振動	正常 ☒
清掃	正常 ☒ 清掃 ☒	電源コード	正常 ☒
トレイ	正常 ☒	殺菌チューブ類	正常 ☒
殺菌槽コネクタ	正常 ☒	マニホールド周辺チューブ	正常 ☒
	☐		☐

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

特に異常なし

装置 情報	交換後運転回数：283	更新（リセット）（実施）・未実施	殺菌/消毒：64	殺菌/消毒+7L：588
	リークチェック：496	自己洗浄：330	7L単独：1	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
ポンプ分解触媒		☒		吸盤		☐	
排水栓		☒		接続コネクタ：水槽側		☐	
ポンプ水濃度計 (5)		☒		接続コネクタ：チューブ側		☐	
ポンプ水濃度計用フィルタ		☒		排水フィルター (14)		☒	
オゾンセンサー		☒				☐	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

H30 年 3 月 9 日

ご署名 杉岡 雅子

印

修理業者 新鋭工業 株式会社 広島支店
広島県広島市西区庚午中4-10-36
TEL：082-275-0740

責任技術者	作業者
杉岡	杉岡

Ver.3.1